



CS 1500

Kurzübersicht



Installieren der Software

1. Legen Sie die DVD der **CS Imaging Software** in das DVD-Laufwerk und installieren Sie die Software. Siehe dazu die Dokumentation zur **CS Imaging Software**: Einzelheiten zum Installationsverfahren finden Sie im *CS Imaging - Installations- und Konfigurationshandbuch (SM998_DE)*.

Informationen zum Installieren der Bildbearbeitungssoftware mit TWAIN-Schnittstelle finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Bildbearbeitungssoftware.

2. Legen Sie die **Installationsassistenten-DVD für CS intraorale Kameras** in das DVD-Laufwerk ein. Falls die DVD nicht automatisch startet, navigieren Sie zu Ihrem DVD-Laufwerk im Windows Explorer und doppelklicken Sie auf die Datei **Launcher.exe**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die **Aufnahme-Schnittstelle** zu installieren und die Kamera einzurichten.

Möglicherweise werden Sie gefragt, ob Sie die Software installieren möchten.



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Software von „Carestream Health“ immer vertrauen** und klicken Sie auf **Installieren**.

Für detaillierte Informationen zu den Funktionen von Kamera und Software lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch auf der **Installationsassistenten-DVD für CS intraorale Kameras**.




www.carestreamdental.com/documentation

Einrichten der kabellosen Kamera




Einrichten der kabelgebundenen Kamera

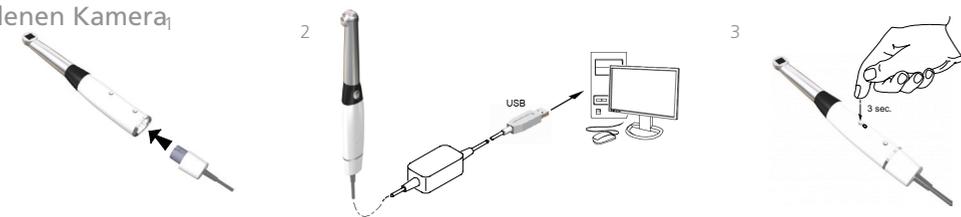




Übersicht der Kamera

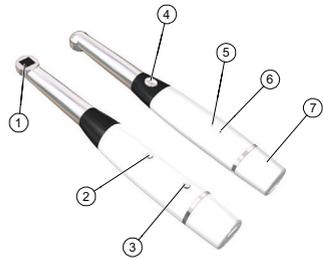

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Fenster für LED und Optik | 6. -Kabelgebundener USB-Anschluss |
| 2. EIN-/AUS-Taste | USB-Verbindungsanzeige |
| 3. -Kabelgebundener USB-Anschluss | -Kabellos: WiFi-Anzeige |
| Taste „Kabelriegelung“ | -Kabellos: Akkuentriegelungstaste |
| -Kabellos: Akkuentriegelungstaste | 7. -Kabelgebundener USB-Anschluss |
| 4. Auslöser | Rapid USB-Kabel |
| 5. Akkuanzeige | -Kabellos: Akku |

Übersicht der Aufnahme-Schnittstelle

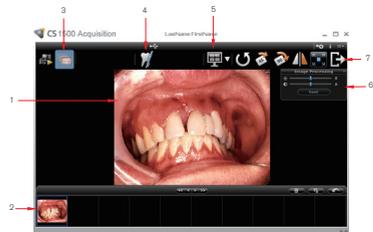

1. Überprüfungs Bildschirm
2. Bildergalerie
3. Überprüfen-Taste
4. Schaltfläche „Zahndiagramm-Kommentar“
5. Schaltfläche „Format auswählen“
6. Bildverarbeitungs-Dialogfeld
7. Beenden

Voreinstellungen


Klicken Sie in der Aufnahmeschnittstelle auf , um die Kamera- und Software-Optionen festzulegen.



Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die richtige Frequenzeinstellung für Ihre Region ausgewählt wurde. Eine falsche Einstellung kann sich negativ auf die Bildqualität auswirken.

Aufnehmen und Betrachten von Videos auf einem Computer

1. Wischen Sie die Linse mit einem feuchten, fusselfreiem Tuch oder einem speziellen Tuch für Kameralinsen ab.
2. Bringen Sie eine Schutzhülle an der Kamera an.

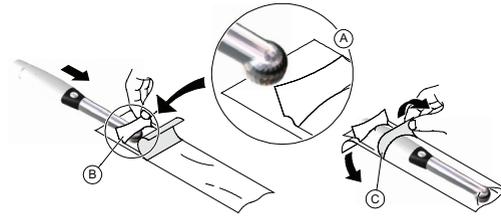

3. Schalten Sie die Kamera ein.




4. Starten Sie die **CS Imaging Software**. Wenn Sie Bildbearbeitungssoftware mit TWAIN-Schnittstelle verwenden, finden Sie weitere Informationen im *CS 1500 Benutzer- und Installationshandbuch*.
5. Erstellen oder öffnen Sie einen Patientendatensatz, wenn anwendbar.
6. Klicken Sie in der **CS Imaging Software** auf  oder  und wählen Sie Ihre Kamera aus.
7. Bitten Sie den Patienten, den Mund ganz zu öffnen.
8. Halten Sie die Kamera über den aufzunehmenden Bereich. Das Videobild wird auf dem Vorschau-Bildschirm angezeigt.
9. Um die Aufnahme zu starten, klicken Sie in der **Aufnahme-Schnittstelle** auf  und klicken Sie erneut, um sie zu beenden.
10. Verwenden Sie die Optionen der Symbolleiste, um aufgenommene Videos anzupassen, zu speichern oder zu löschen.
11. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf , um die **Aufnahme-Schnittstelle** zu schließen.
12. Entfernen und entsorgen Sie die Schutzhülle, wenn Sie mit dem Patienten fertig sind.

Hinweis: Die Videofunktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera über die TWAIN-Schnittstelle verwendet wird.

Aufnehmen und Betrachten von Bildern

1. Wiederholen Sie die Schritte 1-8 von **Aufnehmen und Betrachten von Videos**.
2. So nehmen Sie ein Bild auf: Drücken Sie den **Auslöser** an der Kamera. ODER Klicken Sie auf  in der **Aufnahme-Schnittstelle**.
3. Verwenden Sie die Optionen der Symbolleiste, um aufgenommene Bilder anzupassen, zu speichern oder zu löschen.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf , um die **Aufnahme-Schnittstelle** zu schließen.
5. Entfernen und entsorgen Sie die Schutzhülle, wenn Sie mit dem Patienten fertig sind.

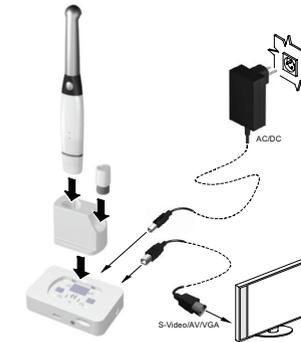

Aufnehmen und Betrachten von Bildern am Bildschirm

1. Schließen Sie die Kamera an einen Bildschirm an.
2. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 unter **Aufnehmen und Betrachten von Videos auf einem Computer**.
3. Bitten Sie den Patienten, den Mund ganz zu öffnen.
4. Halten Sie die Kamera über den aufzunehmenden Bereich.
5. Drücken Sie auf den **Auslöser** der Kamera, um ein Bild aufzunehmen. Auf dem Videobildschirm wird ein Standbild angezeigt.
6. Drücken Sie den **Auslöser** an der Kamera halb herunter und lassen Sie ihn wieder los, um das Live-Video auf dem Videobildschirm zu sehen.
7. Entfernen und entsorgen Sie die Schutzhülle, wenn Sie mit dem Patienten fertig sind.

Carestream Dental

A Division of Carestream Health, Inc.
150 Verona St.
Rochester, NY USA 14608

